

Instruktion – Vibrationsklocka

Laddning av batteriet

Ta försiktigt bort klockan från armbandet. Sätt den längre stiften på klockan i en USB-port på en dator, mobil-laddare eller liknande. Om klockan är korrekt isatt, tänds en blå lysdiod omedelbart. När den slutar blinka är klockan fulladdad.

Ladda klockan helt innan du använder den. "100" betyder fulladdat. För att se batteristatus: Tryck snabbt två gånger på den övre knappen och vänta i 2 sekunder. Ladda batteriet i tid för att säkerställa att dina inställningar sparas.

Inställning av tid

Var uppmärksam på när knappen ska tryckas kort eller hållas nere medan siffror och/eller bokstäver visas.

1. Tryck kort på den övre knappen för att visa den inställda tiden.
2. Tryck igen medan tiden visas och håll knappen nere tills siffran 12 eller 24 börjar blinka. Nu kan du välja mellan 12- eller 24-timmarsvisning. Bekräfta genom att hålla den övre knappen nere tills timmarna börjar blinka.
3. Tryck kort på knappen för att välja rätt timme, tryck uppåt eller nedåt med de två knapparna och bekräfta genom att hålla den övre knappen nere tills minuterna börjar blinka.
4. Tryck kort på knappen tills önskade minuter visas och bekräfta genom att hålla knappen nere tills den korrekta minuttiden visas.

Inställning av första alarmet

Tryck snabbt fyra gånger på den övre knappen. Nu kan du ställa in alarmtiden. Först timtalet. Håll den övre knappen nere tills timtalet blinkar. Välj önskad timme med den övre och nedre knappen. När den önskade timmen är vald, håll den övre knappen nere. Nu börjar minuterna blinka. Tryck kort på den övre eller nedre knappen tills önskad minuttid visas. Bekräfta genom att hålla den övre knappen nere.

A1 On visas, och det första alarmet är nu inställt. Om **A1 Off** visas, tryck på den nedre knappen för att aktivera alarmet (**A1 On**).

Inställning av andra alarmet

Tryck snabbt sex gånger för att ställa in det andra alarmet på samma sätt som ovan. När den andra alarmtiden är inställd och du trycker vidare, visas **2A Off**. Tryck en gång på den nedre knappen för att aktivera alarmet (**A2 On**).

Följ samma procedur för att ställa in fler alarm.

Genom att trycka kort på den övre knappen går du igenom alla alarminställningar.

Inställning av vibrationsalarm

Håll båda knapparna nere i 3 sekunder. Här kan du välja mellan **"SIL"** (tyst) eller **"Vib"** (vibration).

Vid **"SIL"** blinkar alarmet på displayen, men det finns ingen vibration eller ljud.

Vid **"Vib"** vibrerar klockan och ger även ifrån sig ett lätt brummande ljud.

Avstängning av alarm

Tryck på valfri knapp en gång för att stänga av alarmet.

Om du vill stänga av alla alarm, t.ex. under helgen, håll båda knapparna nere i 3 sekunder tills **"SIL"** (tyst läge) visas. Alarmen aktiveras igen genom att hålla båda knapparna nere i 3 sekunder.

För ytterligare detaljer och information om nedräkningsfunktionen, se bruksanvisningen som följde med produkten.

Lycka till med din klocka!

Vänliga hälsningar

DRY & COOL

Dryandcool.se